	<b>MODALITÀ INVIO CAMPIONI IN ACCESSO DIRETTO</b>	Data emissione: 20.05.2013 Revisione n.14
	<b>PO 7.5.1-06</b>	Data revisione: 25.03.2019 Pag 1 di pag 3

## 1. Scopo della procedura

Il laboratorio Magi è un laboratorio accreditato operante per conto del SSN attraverso un accordo negoziale in vigore con **APSS – “Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari”** di Trento.

Lo scopo della presente procedura operativa è quello di descrivere le modalità d’invio dei campioni e la compilazione della relativa modulistica per l’esecuzione di analisi di genetica molecolare presso il Laboratorio Magi.

## 2. MODALITÀ RACCOLTA CAMPIONE BIOLOGICO

***Il materiale biologico per eseguire il test genetico può essere il seguente:***

- a) **sangue venoso:** raccogliere 3 ml di campione ematico in provette da emocromo con anticoagulante EDTA. Se la spedizione avviene entro i 3 giorni dal prelievo, il campione ematico va conservato in frigo (+4°C), altrimenti va conservato in freezer (-20°C) fino al momento dell’invio.
- b) **Saliva:** raccogliere 1 ml di saliva utilizzando il kit di raccolta e prestando attenzione al relativo foglio illustrativo. Il campione va conservato in frigo (+4°C) e può essere spedito 6 mesi dopo la raccolta.
- c) **DNA:** è richiesta una quantità totale tra 2 µg - 3 µg ad una concentrazione minima di 50 ng/µl. Se la spedizione avviene entro i 3 giorni dall’estrazione, il campione di DNA va conservato in frigo (+4°C), altrimenti va conservato in freezer (-20°C) fino al momento dell’invio.
- d) **Tessuto:** prelevare il campione e riporlo in provetta sterile contenente etanolo, conservare in frigo (+4°C). Il campione deve essere spedito entro 24 ore. Tale materiale biologico è esclusivamente idoneo per la ricerca genetica di mutazioni somatiche, deve comunque sempre essere accompagnato da prelievo di sangue o saliva.

**Attenzione:** sulle provette dei campioni devono essere riportati obbligatoriamente il Nome, il Cognome e la data di nascita del paziente.

Il **trasporto** dei campioni viene realizzato a temperatura ambiente tramite corriere convenzionato con il laboratorio Magi che garantisce la consegna entro 24 ore (vedi sito web [http://www.dhl.it/it/contact\\_center/...i\\_express.html](http://www.dhl.it/it/contact_center/...i_express.html)).

	<b>MODALITÀ INVIO CAMPIONI IN ACCESSO DIRETTO</b>	Data emissione: 20.05.2013 Revisione n.14
	<b>PO 7.5.1-06</b>	Data revisione: 25.03.2019 Pag 2 di pag 3

## 6. PREPARAZIONE DEL MATERIALE BIOLOGICO E DELLA DOCUMENTAZIONE

**Sarà necessario predisporre il pacco contenente il seguente materiale e documentazione:**

a) Materiale biologico è da inserire:



nel porta-provette assorbente



nella scatola di cartone




nella busta biohazard


b) Preparare una busta antimanomissione contenente la seguente documentazione:



- Materiale biologico inserito nella busta biohazard precedentemente preparata
- Consenso informato
- Scheda dati clinici
- Fotocopia carta di identità del paziente (se minore anche quella dei genitori)
- Fotocopia Tessera sanitaria
- Modulo Lista campioni
- Impegnative SSN (se presenti)

c) La busta del corriere DHL a cui si dovrà applicare l'apposito adesivo indicante il codice per il trasporto dei campioni biologici "UN 3373" ed in cui si dovrà inserire la buste antimanomissione precedentemente preparata.

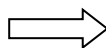

	<b>MODALITÀ INVIO CAMPIONI IN ACCESSO DIRETTO</b>	Data emissione: 20.05.2013 Revisione n.14
	<b>PO 7.5.1-06</b>	Data revisione: 25.03.2019 Pag 3 di pag 3

## 7. PRENOTAZIONE DELLA SPEDIZIONE DELLA BUSTA

Per il ritiro del pacco sarà sufficiente contattare il Laboratorio MAGI che si occuperà di prenotare la spedizione con il corriere convenzionato DHL.

### Contatti:

Telefonico: **Addetto CUP** 0464-420795 (dalle 09.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 17.30)

E-mail: [front.office@assomagi.org](mailto:front.office@assomagi.org)